




Circuito em silicone

Circuitos compatíveis com os produtos destinados à ventilação mecânica e sistema de anestesia

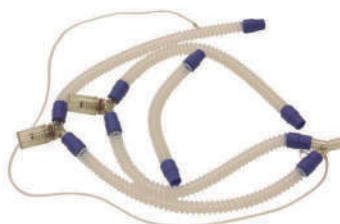

000728 - CIRCUITO ADULTO EM SILICONE SERVO 900 E SERVO I COMPATÍVEL MAQUET

000725 - CIRCUITO ADULTO EM SILICONE COMPAT. SMART ASPEN E MONTEREY

002135 - CIRCUITO ADULTO EM SILICONE COMPAT. NIKKEI SHOGUN FUJI

000138 - CIRCUITO BIRD 6400/8400 EM SILICONE COMPLETO

002928 - CIRCUITO COMP.NEWPORT EM SILICONE ADULTO

002929 - CIRCUITO COMP.NEWPORT EM SILICONE INFANTIL

004519 - CIRCUITO COMPATIVEL OXYLOG ADULTO SEM VALVULA

004520 - CIRCUITO COMPATIVEL OXYLOG INFANTIL SEM VALVULA

002503 - CIRCUITO DENVER COMP TAKAOKA ADULTO

002127 - CIRCUITO EM SILICONE ADULTO COMPAT.ORIGAMI

006135 - CIRCUITO EM SILICONE ADULTO P/MODELO SAT 500

001659 - CIRCUITO EM SILICONE P/VENT.COMP. DIXTAL ADULTO

002843 - CIRCUITO EM SILICONE P/VENT.COMP. DIXTAL INFANTIL

006201 - CIRCUITO EM SILICONE P/VENT.COMP.GE ADULTO

006204 - CIRCUITO EM SILICONE P/VENT.COMP.GE INFANTIL

000923 - CIRCUITO INF COMPAT SERVO 900 E SERVO I MAQUET

000724 - CIRCUITO INF.SILICONE COMPAT SMART ASPEN E MONTEREY

002134 - CIRCUITO INFANTIL COMPAT NIKKEI SHOGUN FUJI

002133 - CIRCUITO INFANTIL COMPAT ORIGAMI

RO140 - CIRCUITO INTER 3 OU 5 COMPLETO SIL.INF/NEO E SIMILARES

RO139 - CIRCUITO INTER 5 COMPLETO EM SILICONE AD.E SIMILARES

004444 - CIRCUITO P/ RESPIRADOR SILICONE CARMEL ADULTO

006211 - CIRCUITO P/ RESPIRADOR SILICONE CARMEL INFANTIL

001083 - CIRCUITO P/ANEST. EM SILICONE 1,20 MT AD.ROMED

001082 - CIRCUITO P/ANEST.EM SILICONE 1,20 MT INF/NEO ROMED

005094 - CIRCUITO P/ANEST.EM SILICONE 1,50 MT AD.ROMED

005015 - CIRCUITO P/ANEST.EM SILICONE 1,60 MT INF/NEO ROMED

004770 - CIRCUITO P/ANEST.EM SILICONE 1,80 MT AD.ROMED

005093 - CIRCUITO P/ANEST.EM SILICONE 2,00 MTS AD.ROMED

004797 - CIRCUITO P/ANESTESIA ADULTO COMP.DRAGER MOD.FABIUS

004798 - CIRCUITO P/ANESTESIA INFANTIL COMP.DRAGER MOD.FABIUS

004799 - CIRCUITO P/VENT.ADULTO SIL.COMP.DRAGER MOD.SAVINA

004800 - CIRCUITO P/VENTILADOR INF.SIL.COMP.DRAGER MOD.SAVINA

000645 - CIRCUITO EM SILICONE COMP. LEISTUNG LUFT 2 ADULTO

000646 - CIRCUITO EM SILICONE COMP. LEISTUNG LUFT 2 INFANTIL

RO158 - CIRCUITO AD.SIL.C/5 TRAQ.60CM+2 DRENOS+Y S/FURO

RO145 - CIRCUITO ANEST.AD.C/3 TRAQ.22X1500 MM C/Y 90°

RO146 - CIRCUITO ANEST.INF.C/3 TRAQ.15X1500 MM C/Y 90°

RO155 - CIRCUITO P/ ANESTESIA AD.C/ 3 TRAQ.E BALAO SILICONE

RO156 - CIRCUITO P/ ANESTESIA INF.C/ 3 TRAQ.E BALAO SILICONE

RO6265 - CIRCUITO P/ANEST.ADULTO COMP.MEDTRONIC


RO6266 - CIRCUITO P/ANEST.INFANTIL COMP.MEDTRONIC

RO157 - CIRCUITO PACIENTE SIL.AD.COMP. MONNAL T75 / T60

RO6263 - CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COMP.MEDTRONIC

RO6264 - CIRCUITO RESPIRATORIO INF. COMP.MEDTRONIC


000726 - CIRCUITO SILICONE VLP 4000

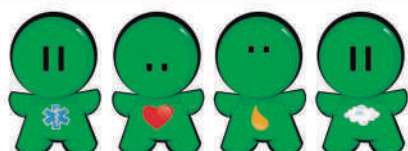

TELEVENDAS
PABX: (11) 3718-1000
WWW.ROMED.COM.BR

 @RomedSP  /romedbrasil

 vendas@romed.com.br

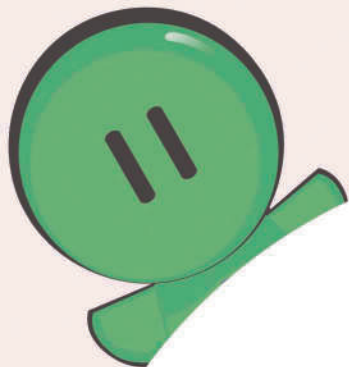

ATENÇÃO:

A – DESCRIÇÃO

O CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MARCA ROMED, É INDICADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASES NOS PROCEDIMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA, UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARA USO EM UMIDIFICADORES, RESPIRADORES E APARELHOS DE ANESTESIA NACIONAIS E IMPORTADOS.

B – PRECAUÇÕES E NOTAS

O CIRCUITO RESPIRATÓRIO DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAL QUALIFICADO E OPERADO POR PESSOAL TREINADO. É NECESSÁRIA A LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO ANTES DE UTILIZAR O CIRCUITO EM PACIENTES. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ANTES DO COMPLETO ENTENDIMENTO DAS SUAS CARACRÍSTICAS E FUNÇÕES, RESULTA EM CONDIÇÕES DE RISCO PARA O PACIENTE E O PRÓPRIO PRODUTO, OU SEJA:

- *ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E APÓS A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES, LIMPE, DESMONTE E ESTERILIZE O CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *MANUSEIE O PRODUTO CUIDADOSAMENTE. NÃO SOBRECARREGUE OS ENCAIXES;
- *ANTES DE UTILIZAR, VERIFIQUE SE O PRODUTO NÃO POSSUI IMPERFEIÇÕES;
- *ANTES DE CONECTAR O CIRCUITO AO PACIENTE, FAÇA UM TESTE MECÂNICO COM BALÃO DE SILICONE / BORRACHA PARA VERIFICAR SE NÃO EXISTE VAZAMENTO;
- *VERIFIQUE SE AS CONEXÕES ESTÃO LIGADAS AO VENTILADOR MECÂNICO / ANESTESIA, BEM COMO AO PACIENTE PARA EVITAR PERDA DE GASES;
- *APÓS CADA UTILIZAÇÃO, DEVERÁ SER FEITA A DESINFECÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *NUNCA CUBRA O CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM MANTAS, LENÇÓIS, TOALHAS OU OUTROS MATERIAIS PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA UTILIZAR CORRETAMENTE O PRODUTO E TIRE O MÁXIMO PROVEITO DOS RECURSOS RELATADOS E EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE.

C – PROCEDIMENTOS DE USO

1. ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE:

- A) DE QUE ESTÁ LIMPO ADEQUADAMENTE;
- B) DA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONECTORES INTERMEDIÁRIOS;
- C) DOS CUIDADOS CONFORME ITEM PRECAUTENÇÃO:

- *ANTES DE INSTALAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL. VERIFIQUE
- *CERTIFIQUE-SE QUE A PESSOA RESPONSÁVEL PARA INSTALAR E UTILIZAR O PRODUTO, ESTEJA DEVIDAMENTE TREINADA.
- *ESTE PRODUTO PODE SOBRER ALTERAÇÕES, SEM PRÉVIO AVISO AO USUÁRIO.
- *PRODUTO NÃO ESTÉRIL.


A – DESCRIÇÃO

O CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MARCA ROMED, É INDICADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASES NOS PROCEDIMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA, UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARA USO EM UMIDIFICADORES, RESPIRADORES E APARELHOS DE ANESTESIA NACIONAIS E IMPORTADOS.

B – PRECAUÇÕES E NOTAS

O CIRCUITO RESPIRATÓRIO DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAL QUALIFICADO E OPERADO POR PESSOAL TREINADO. É NECESSÁRIA A LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO ANTES DE UTILIZAR O CIRCUITO EM PACIENTES. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ANTES DO COMPLETO ENTENDIMENTO DAS SUAS CARACRÍSTICAS E FUNÇÕES, RESULTA EM CONDIÇÕES DE RISCO PARA O PACIENTE E O PRÓPRIO PRODUTO, OU SEJA:

- *ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E APÓS A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES, LIMPE, DESMONTE E ESTERILIZE O CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *MANUSEIE O PRODUTO CUIDADOSAMENTE. NÃO SOBRECARREGUE OS ENCAIXES;
- *ANTES DE UTILIZAR, VERIFIQUE SE O PRODUTO NÃO POSSUI IMPERFEIÇÕES;
- *ANTES DE CONECTAR O CIRCUITO AO PACIENTE, FAÇA UM TESTE MECÂNICO COM BALÃO DE SILICONE / BORRACHA PARA VERIFICAR SE NÃO EXISTE VAZAMENTO;
- *VERIFIQUE SE AS CONEXÕES ESTÃO LIGADAS AO VENTILADOR MECÂNICO / ANESTESIA, BEM COMO AO PACIENTE PARA EVITAR PERDA DE GASES;
- *APÓS CADA UTILIZAÇÃO, DEVERÁ SER FEITA A DESINFECÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *NUNCA CUBRA O CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM MANTAS, LENÇÓIS, TOALHAS OU OUTROS MATERIAIS PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO;
- *LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA UTILIZAR CORRETAMENTE O PRODUTO E TIRE O MÁXIMO PROVEITO DOS RECURSOS RELATADOS E EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE.

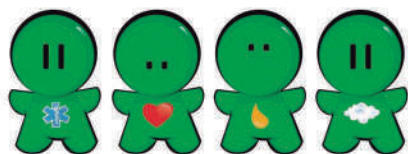

TELEVENDAS
PABX: (11) 3718-1000
WWW.ROMED.COM.BR

 @RomedSP  /romedbrasil

 vendas@romed.com.br

C – PROCEDIMENTOS DE USO

1. ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE:

- A) DE QUE ESTÁ LIMPO ADEQUADAMENTE;
- B) DA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONECTORES INTERMEDIÁRIOS;
- C) DOS CUIDADOS CONFORME ITEM PRECAUÇÕES;

2. PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE VERIFICAÇÃO FUNCIONAL DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO E AÇÕES RECOMENDADAS PARA A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS ENCONTRADAS NO TESTE:

O CIRCUITO DEVE SER TESTADO NAS SEGUINTE SITUATÖES:

- *ANTES DE SUA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO;
- *APÖS A LIMPEZA, DESINFECÖÃO OU ESTERILIZAÇÃO;
- *APÖS A MONTAGEM DE QUALQUER PEÖA;
- *APÖS CADA PROCEDIMENTO.

3. PROCEDIMENTO DE OPERAÖÃO:

A) RELACIONE E PEGUE O CIRCUITO DEVIDAMENTE LIMPO E DESINFETADO OU ESTERILIZADO;

B) VERIFIQUE SE AS CONEXÖES SÖO COMPATÍVEIS COM O USO PRETENDIDO;

C) CHEQUE SE NÖO HÖ OBSTRUÖÃO, DOBRA OU VAZAMENTO NO CIRCUITO;

D) CERTIFIQUE SE OS GASES ESTÖO SENDO ALIMENTADOS ADEQUADAMENTE CONFORME ORIENTAÖÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÖVEL;

E) APÖS O TÖRMINO DO PROCEDIMENTO, REALIZE A LIMPEZA, DESINFECÖÃO E/OU ESTERILIZAÇÃO, CONFORME A DESCRIÖÃO DE PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFECÖÃO.

D – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFECÖÃO

LIMPEZA

*UTILIZE AS INSTRUÖÖES DOS FORNECEDORES DE AGENTES DE LIMPEZA, BEM COMO DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E/OU DESINFECÖÃO, E DEVEM SER SEGUIDAS AS CONDIÖÖES DE APLICAÖÃO COMO Ö TEMPERATURA, DURAÖÃO DO PROCESSO, AERAÖÃO E OUTROS;

*AS PARTES EXTERNAS DO CIRCUITO DEVEM SER LIMPAS COM UM PANO LIMPO, MACIO E UMEDECIDAS EM SOLUÖÃO GERMECIDA APROPRIADA, TOMANDO-SE CUIDADO PARA QUE O RESÍDUO DE PRODUTO DE LIMPEZA NÖO SE ACUMULE NAS ESPIRAS DO PRODUTO;

*APÖS A LIMPEZA, FAÖA A SECAGEM COM UM PANO LIMPO, MACIO E SECO.

ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÖÃO

- UTILIZE UMA SOLUÖÃO GERMICIDA APROPRIADA OU ÖXIDO DE ETILENO (C₂H₄O).
 - A ESTERILIZAÇÃO UTILIZANDO-SE O GÖS ÖXIDO DE ETILENO DEVE OBEDECER AOS PARÖMETROS DE TEMPERATURA Ö 54ÖC (130ÖF);
- ATENÖÃO:

- APÖS A ESTERILIZAÇÃO EM ÖXIDO DE ETILENO, AGUARDE DE 24 Ö 48 HORAS ANTES DE UTILIZAR O MATERIAL, PARA PERMITIR A AERAÖÃO E SÖIDA DOS RESÍDUOS DE GÖS.
- AO UTILIZAR ÖXIDO DE ETILENO, SIGA AS INSTRUÖÖES FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO, PARA DETERMINAR AS TEMPERATURAS E OS PERÍODOS DE AERAÖÃO INDICADOS.

• AUTOCLAVE

ATENÖÃO:

-OS COMPONENTES EM POLICARBONATO NÖO SUPORTAM TEMPERATURAS ACIMA DE 121°C.

-PROCEDIMENTO PARA ESTERILIZAR A TRAQUEIA DE SILICONE, TUBO PROXIMAL, CONECTORES, E JARRA DE UMIDIFICADOR AQUECIDO EM AUTOCLAVE;

*SIGA AS INSTRUÖÖES DOS FABRICANTES DE AUTOCLAVES NO QUE SE REFERE Ö TEMPERATURA, PRESSÖO E TEMPO.

*LIMPE

*EMBALE O PRODUTO E ESTERILIZE INDIVIDUALMENTE

*AS PEÖAS DEVEM PERMANECER DENTRO DA CÖMARA DURANTE 15MIN Ö 121°C OU 4MIN Ö 134°C;

*NÖO COLOCAR AS PEÖAS SEM EMBALAGEM ADEQUADA DENTRO DA CÖMARA;

*NÖO ENCOSTAR AS PEÖAS NA PAREDE DA CÖMARA;

*NÖO COLOCAR PEÖAS EM CIMA DAS OUTRAS;

-PROCEDIMENTO PARA ESTERILIZAR O DRENO COLETOR EM AUTOCLAVE:

SEPARE AS PARTES DO DRENO COLETOR.


(CABEÖOTE / HASTE / ORING / SUPORTE / MOLA / COPO)



DRENO COLETOR DE ÖGUA
(COPO ROSCA)



DRENO COLETOR DE ÖGUA
(COPO ENCAIXE)

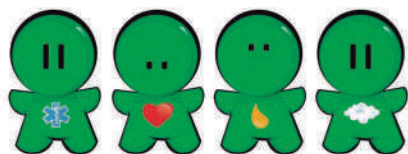

TELEVENDAS
PABX: (11) 3718-1000
WWW.ROMED.COM.BR

@RomedSP /romedbrasil

vendas@romed.com.br



NOTA: NÃO COLOCAR O DRENO COLETOR MONTADO DENTRO DA AUTOCLAVE.

LIMPE;

EMBALE O PRODUTO E ESTERILIZE INDIVIDUALMENTE;

*AS PEÇAS DO DRENO COLETOR DEVEM PERMANECER DENTRO DA CÂMARA DURANTE 15MIN A 121°C;

*NÃO COLOCAR AS PEÇAS SEM EMBALAGEM ADEQUADA DENTRO DA CÂMARA;

*NÃO ENCOSTAR AS PEÇAS NA PAREDE DA CÂMARA;

*NÃO COLOCAR PEÇAS EM CIMA DAS OUTRAS:

E – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TUBO PROXIMAL

MATERIAL: SILICONE

TRAQUÉIA

MATERIAL: SILICONE

CONECTORES "Y" E 90°

MATERIAL: POLICARBONATO



DRENO COLETOR

MATERIAL: POLICARBONATO

JARRA PARA UMIDIFICADOR AQUECIDO (OPCIONAL)

MATERIAL: POLICARBONATO

JARRA PARA UMIDIFICADOR AQUECIDO

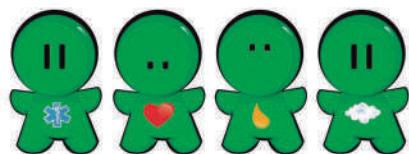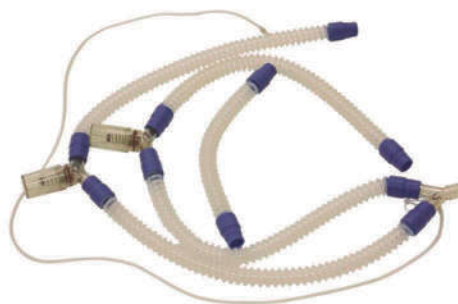

TELEVENDAS
PABX: (11) 3718-1000
WWW.ROMED.COM.BR

 @RomedSP  /romedbrasil

 vendas@romed.com.br