



# INSTRUÇÕES DE USO

## Umidificador/Macronebulizador Micronebulizador



Os produtos: umidificadores, macronebulizadores, micronebulizadores da ROMED são acessórios para uso médico-hospitalar, projetados para aliar tecnologia e facilidade de manuseio, para uso em oxigenioterapia. A família de "Oxigenioterapia" ROMED é composta pelos modelos relacionados abaixo, os quais desempenham basicamente a mesma função de auxílio na aplicação de oxigenioterapia ao paciente. Umidificadores, Macronebulizadores, Micronebulizadores, aplicadores de medicamentos vaporizados e umidificados.

Encontram-se descritas abaixo as características principais dos produtos para Oxigenioterapia ROMED:

Produtos auxiliares da oxigenioterapia, são utilizados para aplicação de drogas ao paciente por meio de gás umidificado.

Fácil manuseio e Assepsia.

Fabricados de acordo com as normas ABNT.

Uso indicado apenas por profissionais qualificados

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Todos os produtos necessitam de uma rede ou cilindro de gás para seu funcionamento. O gás sai da rede ou cilindro e tem sua pressão controlada pelos reguladores, a vazão do gás é medida pelo fluxômetro que é acoplado ao aplicador de medicamentos, vaporizando o medicamento escolhido e umidificado.

### FINALIDADE, INDICAÇÕES e MANUSEIO

Os aparelhos de oxigenioterapia ROMED destinam-se a auxiliar na aplicação de oxigenioterapia ao paciente em diferentes procedimentos hospitalares. As principais áreas de aplicação destes equipamentos são: Inalações, aplicação de medicamentos via aérea, vaporizados e umidificados.

- Macronebulizadores, micronebulizadores e umidificadores:
  - o Abasteça o copo do produto com o medicamento receitado pelo profissional competente.
  - o Rosqueie o copo à tampa até fechar completamente.
  - o Conecte o produto à fonte de gás, observando se o rosqueou corretamente para evitar vazamentos.
  - o Gire o botão de controle de fluxo do fluxômetro para a direita até atingir a leitura desejada.
  - o Para diminuir o fluxo do gás, gire o botão para a esquerda até atingir a leitura desejada.
  - o Leve a máscara à face do paciente e siga as instruções recomendadas pelo médico.



#### PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

Estabeleça uma rotina de limpeza e esterilização para os produtos que entram em contato direto com o paciente.

As partes externas poderão ser limpas com um pano umedecido em solução germicida apropriada.

#### INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO

##### MACRONEBULIZADOR/MICRONEBULIZADOR

Ácido Peracético: 1% para desinfecção de alto nível.

OBS.: Para desinfecção de baixo nível, utilize ácido peracético à 0,5% por um período de 10 min.

Óxido de Etileno (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O) – Para esterilização utilizando o gás Óxido Etileno obedecer aos parâmetros de temperatura de 54°C (130°F).

#### INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO

##### UMIDIFICADOR

Ácido Peracético: 1% para desinfecção de alto nível.

OBS.: Para desinfecção de baixo nível, utilize ácido peracético à 0,5% por um período de 10 min.

Álcool 70% - Mantenha totalmente imerso em álcool 70% por 15 min.

Registro MS: 81284390006 | 81284390008

CNPJ 13.644.713/0001-30

ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP.MÉDICOS LTDA

[www.romed.com.br](http://www.romed.com.br) - e-mail: [romed@romed.com.br](mailto:romed@romed.com.br)

Tel.55(11) 3718-1000

