



Válvula PEEP

RO1049 Válvula PEEP 0-10 CM H²O
RO1050 Válvula PEEP 5-20 CM H²O
RO1052 Suporte válvula PEEP (DIVERTER) P/Ambu



DESCRIÇÃO

A válvula PEEP, é um acessório para ser utilizado acoplado com a válvula superior do reanimador manual.

Princípios de Funcionamento

Permite o controle da expiração do paciente, através de um diafragma do tipo guarda-chuva (umbrela) e mola de aço.

Aplicação clínica

Utilizada como acessório para fornecer pressão respiratória positiva e expiratória para Reanimadores Manuais.

PRECAUÇÕES E NOTAS

Precauções A válvula deve ser manuseada e operada por pessoal qualificado e treinado. É imprescindível a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO antes de utilizar a válvula em pacientes.

A utilização do produto antes do completo entendimento das suas características e funções resulta em condições de risco para o paciente e o próprio produto. Os parágrafos precedidos das seguintes palavras merecem especial atenção:

Cuidado

Indica condições que podem afetar adversamente operador ou paciente.

Atenção

Indica condições que podem afetar ou danificar o produto e seus acessórios.

Nota

Indica uma informação adicional para melhor compreensão do funcionamento do produto.

Cuidado!

Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE, DESMONTA e DESINFECTE/ESTERILIZE a válvula e o suporte (Divert-er); • Leia com atenção este manual de instrução para utilizar corretamente o produto. Deve-se tirar o máximo proveito dos recursos relatados. • Certifique-se de que as pessoas responsáveis para instalar e utilizar o equipamento estejam devidamente treinadas. • Caso não siga as precauções descritas, isso pode provocar desconforto ao paciente e ao profissional, e será considerado mau uso do produto. • Produto NÃO ESTÉRIL.

Atenção! •

Siga corretamente as instruções para limpeza e desinfecção/esterilização dos componentes;

Nota! •

Evite operar a válvula sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO

1. Certifique-se de que a válvula e o suporte estejam devidamente limpos e desinfetados /esterilizados;
2. Conecte o suporte para válvula PEEP (Diverter) à saída do paciente (válvula superior do reanimador).
3. Gire o suporte para válvula PEEP (Diverter) para a direção do paciente ou para a posição do pessoal de emergência;
4. Comprima o reanimador algumas vezes para se certificar de que todas as funções estão normais após a montagem;
5. Escolha a válvula PEEP apropriada dentro da escala da especificação (0-10cm.H₂O ou 5-20cm.H₂O)
6. Gire o botão da válvula PEEP para regulagem da pressão de necessária para procedimento indicado no corpo da válvula.
7. Como mostrado no desenho explodido da página
- 8, prenda a válvula PEEP ao suporte para válvula PEEP (Diverter), conecte na válvula superior do reanimador manual e pulmão teste, pressione o reanimador para o movimento de troca de ar no pulmão teste e ajuste a pressão apropriada necessária na Válvula PEEP;
9. Conecte a Máscara;
10. Siga as Instruções de Uso do Reanimador;

Nota!

Verifique a integridade física do produto; • Após o uso, efetue os procedimentos de desinfecção/esterilização, desmontando o produto e separando suas partes; • Elimine qualquer resíduo existente.

PREPARAÇÃO PARA LIMPEZA

Cuidado!

- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE, DESMONTE e DESINFECTE/ESTERILIZE a válvula e o suporte;

Atenção!

Para realizar a limpeza da Válvula e do Suporte, é necessário desrosquear ou desencaixar as suas partes. A desconexão é realizada desrosqueando e puxando os itens no sentido contrário de onde estão acoplados, isto é:

Para a Válvula PEEP - Desrosqueie as partes e remova o conjunto de acionamento (conforme vista explodida);

Para o Suporte da Válvula (Diverter) - Desencaixe o silicone de vedação (conforme vista explodida);

A desmontagem desses itens deve ser realizada desrosqueando, desencaixando os itens dos outros. Em caso de dúvidas, consulte as vistas explodidas contidas neste manual de instrução.

Importante!

A montagem desses itens deve ser realizada rosqueando e encaixando os itens uns aos outros. Em caso de dúvidas, consulte as vistas explodidas contidas neste manual de instrução. A conexão é realizada empurrando/encaixando os itens contra os quais eles foram, inicialmente, retirados.

LIMPEZA

Cuidado!

Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo às condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

- Para rotina de limpeza não pode ser utilizado: Hipoclorito de sódio
- A limpeza deve ser realizada com água corrente e sabão neutro;
- Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco ou ar comprimido medicinal.

Ácido Peracético

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Óxido de Etileno (C₂H₄O)

A esterilização utilizando o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).

Atenção!

Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás. • Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.

AUTOCLAVE

Siga as instruções dos fabricantes de autoclaves no que se refere à temperatura, pressão e tempo.

Procedimento de esterilização em autoclave:

Limpe; • Embale o produto e esterilizar individualmente; • As peças devem permanecer dentro da câmara durante 15 minutos a 121°C. • Não coloque as peças dentro da câmara, sem embalagem adequada; • Não encoste as peças na parede da câmara; • Não coloque as peças umas em cima das outras;

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A integridade física do produto e seus acessórios de vedação e conexão devem ser verificados após cada procedimento. Para uma manutenção segura, solicite auxílio a uma Assistência técnica autorizada Romed.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em local limpo e seco, sob temperatura entre -40°C à 70°C e com umidade relativa inferior a 90% (Não Condensada). Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. • Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 50°C e com umidade relativa inferior a 75%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Válvula: Cobertura externa: Policarbonato (PC) Revestimento Interior: Borracha EPDM sólida Obturador de Válvula: Silicone Acabamento da Válvula: Policarbonato (PC) Mola: Aço inoxidável Pressão de Abertura: 0 a 10 cm.H₂O 5 a 20 cm.H₂O Suporte (Diverter) Suporte: Policarbonato (PC) Vedação: Silicone.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed garante este produto contra defeito de material ou fabricação que nele se apresenta durante o prazo de 90 dias, contados a partir da entrega do produto com a Nota Fiscal de Venda, ao seu proprietário.

Não se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilização e/ou instalação inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no manual;
2. Violação, ajustes ou manutenção realizados por pessoal não autorizado;
3. Acidentes ou agentes da natureza. Os serviços em garantia serão prestados pela Romed ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR Romed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda

Rua Major Vieira, 130 – Jardim Lambreta – Cotia – S.P. Cep 06710-680

CNPJ: 13.644.713/0001-30 I.E.: 278.116.940.117

Autorização de Funcionamento ANVISA Nº 8.12.843-9

Número do Registro do Produto no Ministério da Saúde/ANVISA: 81284390011

PABX: 55 (11) 3718-1000 Fax: 55 (11) 3718-1009

http://www.romed.com.br E-mail: romed@romed.com.br

