



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Máscaras Para Oxigênio Romed

RO1079 - Máscara Venturi Adulto Romed

RO1080 - Máscara Venturi Infantil Romed

As máscaras Venturi constituem um método seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio sem considerar a profundidade e frequência respiratória do paciente.

Máscara confeccionada em PVC Traqueia corrugada 15mm em PVC 06 diluidores Suporte dos diluidores Extensão para conexão no umidificador PVC.

RO1083 - Máscara Alta Concentração Adulto Romed

RO1084 - Máscara Alta Concentração Infantil Romed

Máscara com elástico confeccionada em PVC e Balão para oxigênio e extensão.

RO1085 - Máscara Média Concentração Adulto Romed

RO1086 - Máscara Média Concentração Infantil Romed

Máscara com elástico confeccionada em PVC com extensão, são indicadas para uso no umidificador.

RO1081 - Máscara Traqueostomia Adulto Romed

RO1082 - Máscara Traqueostomia Infantil Romed

Máscara c/ faixa elástica ajustável, confeccionada em PVC macio Cúpula transparente para visualização Conector com ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão.

RO1088 - Máscara Facial Adulto Romed

RO1089 - Máscara Facial Infantil Romed

Máscaras confeccionadas em PVC, são indicadas para uso no macronebulizador.

RO1087 - Máscara Pocket Mask com Estojo de Zíper Romed

RO1087-2 - Máscara Pocket Mask com Estojo Rígido Romed

Indicada para casos de emergência, as máscaras ressuscitadoras Pocket são práticas, higiênicas e totalmente desmontáveis, permitindo facilidade de transporte e manuseio.

Máscara confeccionada em PVC Filtro bactericida Estojo de plástico rígido ou nylon/PVC cristal com zíper para armazenamento.

LIMPEZA

Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE a Máscara, DESMONTE e DESINFECTE /ESTERILIZE.

A limpeza antes do uso pode ser feita com água morna e sabão neutro e/ou lavagem por imersão em solução de detergente enzimático neutro, à temperatura entre 35 °C e 54 °C, durante 10 minutos. O enxágue deve ser feito com água destilada ou filtrada de forma a eliminar as altas concentrações de cloro e/ou outros contaminantes que possam afetar os materiais e deixe-a secar ao ar.

Álcoois jamais devem ser utilizados para limpeza da Máscara.

Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

DESINFECÇÃO / ESTERILIZAÇÃO

Ácido Peracético

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

As Máscaras não é passível de manutenção preventiva.

A Máscara deve ser descartada após o uso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed Indústria garante este produto contra defeito de material ou fabricação por um período de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de venda.

Não se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilização e/ou instalação inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no manual;
2. Violação, ajustes ou manutenção realizados por pessoal não autorizado;
3. Acidentes ou agentes da natureza.

Os serviços em garantia serão prestados pela Romed Indústria ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.

Fabricante/Distribuidor:

ROMED Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda

Rua Major Vieira,130 – Jardim Lambreta

CEP 06710-680 - Cotia – S.P.

CNPJ:13.644.713/0001-30 I.E.: 278.116.940.117


Autorização de Funcionamento ANVISA N ° 8128439

Tel: (11) 3718-1000

www.romed.com.br

e-mail: romed@romed.com.br

Registro na ANVISA / MS.: 81284390009

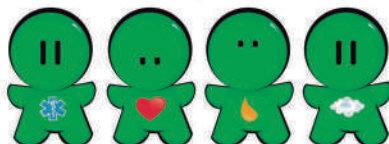

"PRODUTO NÃO ESTÉRIL"

"ESTERILIZAR ANTES DO USO"