



Especificação do Produto

Código	Descrição
001740	PRESILHA EM SILICONE P/MÁSCARA ALMOFADADA ADULTO/INFANTIL
000972	PRESILHA EM SILICONE P/MÁSCARA C/GARRA ADULTO G

Indicação de Uso/Finalidade

Fixar máscara para ventilação não invasiva e anestesia

Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação

Fixar a máscara através dos orifícios nas bandas laterais

Modo de Uso do produto

Posicionar a Presilha de silicone na parte posterior da cabeça do paciente; Tracionar as bandas laterais do fixador para a região da face;

Fixar a máscara posicionando os pinos no interior dos orifícios da presilha.

Composição (inclui a caracterização, matéria prima do produto e/ou dos seus constituintes; por exemplo, suas partes, componentes e acessórios)

SILICONE

Dimensões/volumes

Tamanho	ALTURA CM	COMPRIMENTO CM
Adulto	15	66
Adulto/infantil	10	55

Produto não estéril.

Condições de Armazenamento (inclusive citar os parâmetros de temperatura e umidade)


Local seco

Condições de Manipulação

Após o uso lavar e água fria ou morna e detergente neutro e secar.

Advertências

Certifique que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente violação da embalagem, não utilizar o material.

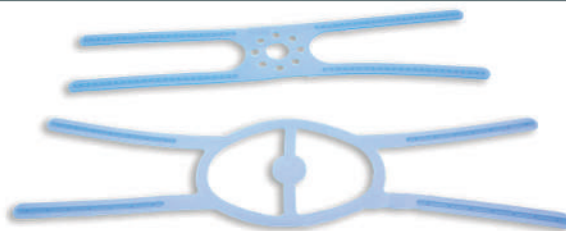

Ligue para nós (11) 3718-1000

