



Conectores Intermediários



Manual de Instruções

Atenção antes de utilizar, leia atentamente as instruções contidas no manual.
Certifique-se que a pessoa responsável para utilizar o produto, esteja devidamente treinada.
Este produto pode sofrer alterações, sem prévio aviso ao usuário.
Produto NÃO ESTÉRIL.

A – Descrição.

Os Conectores Intermediários são dispositivos constituídos de Nylon, Polissulfona, Policarbonato, PP e Poliestireno disponíveis em vários modelos, afim de se adequar a diversos procedimentos médico-hospitalares.

Os conectores para serem utilizados em circuitos respiratórios, obedecem aos requisitos da Norma NBR-10335 (Eb 1736) – Conectores para tubo traqueal.

B – Precauções e Notas

Siga estritamente as instruções de uso.

Este produto deve ser utilizado por profissionais da área médica com conhecimento sobre o manuseio do produto.

O produto deve ser utilizado unicamente na finalidade para qual é indicado.

Antes da primeira utilização e após a utilização em pacientes LIMPE e FAÇA A DESINFECÇÃO e / ou ESTERILIZE.

Manuseie o produto cuidadosamente.

Antes de utilizar, verifique se o produto não possui imperfeições.

Leia com atenção este Manual de Instrução, para utilizar corretamente o produto e deve-se tirar o máximo proveito dos recursos relatados, e em caso de dúvidas procure suporte técnico Romed.

C – Procedimento de Uso

Antes de utilizar, certifique-se:

- De que está limpo adequadamente;
- De que passou pelo processo de limpeza;

Para uma nova utilização limpe adequadamente.

Após ter terminado o procedimento, realize a limpeza, desinfecção e/ou esterilização, conforme o item D.

D – Procedimento de Limpeza e Desinfecção / Esterilização

- Limpeza

A lavagem deve ser feita por imersão em solução com detergente enzimático neutro, à temperatura entre 35°C e 54°C, por 10 minutos. O enxágue deve ser feito com água destilada ou filtrada a eliminar as altas concentrações de cloro e / ou outros contaminantes que possam afetar os materiais.

- Desinfecção / Esterilização

Para conectores em Nylon/PP/PS:

Indicações de Esterilização/Desinfecção Ácido Peracético - Para conectores em Poliestireno e Polipropileno Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% p/ desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 min. Utilizando luvas, enxágue em água esteril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 min. Monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização. Nota: Para desinfecção de baixo nível de risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 min. e siga as sequências acima descritas. Autoclave - Para conectores

Óxido de Etileno (C₂H₄O) - Para esterilização utilizando o gás Óxido Etileno obedecer aos parâmetros de temperatura de 54°C (130°F).

Atenção após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

Para conectores em Policarbonato / Polissulfona:

- Autoclave

Para conectores em Policarbonato e Polissulfona Desmonte as peças: Limpe todas as peças desmontadas. Embale todas as peças e esterilize separadamente.

As peças devem permanecer dentro da câmara durante 15min, a 127°C. Não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmara. Não encoste as peças na parede da câmara. Não coloque peças em cima das outras:

E – Especificações Técnicas**- Material**


Nylon (PA), Poliestireno (PS), Policarbonato (PC) e Polissulfona (PSU).

- Conexões

Obedecem a norma NBR-10335 (Eb-1736) – Conectores para tubo Traqueal

F – Certificado de Garantia

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação por um período de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da nota fiscal de venda. Manutenção realiza por pessoas não autorizadas ou ainda armazenamento inadequado e operação em desacordo com os procedimentos contidos neste manual, tornam sem efeito esta garantia e isenta o fabricante de qualquer responsabilidade, no caso de acidentes pessoais e/ ou prejuízos à instituição.

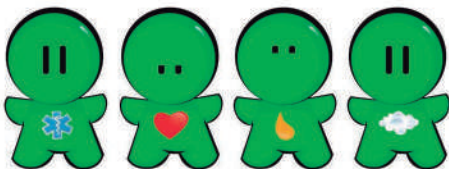

Nome técnico: Conector e Conexão

Nome comercial: Conectores Intermediários

Registro na ANVISA/MS: 81284390003 |

81284390004

Responsável Técnico: Vide etiqueta de rotulagem

The logo for ROMED, featuring a stylized heartbeat line above the word "ROMED" in a bold, sans-serif font.

ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Rua Major Vieira, 130 – Bairro JD Lambreta – Cotia – S.P. – CEP 06710-680

CNPJ: 13.644.713/0001-30

Inscrição Estadual: 278.116.940/17

PABX: 55 (11) 3718-1000

FAX: +55 (11) 3718-1009

www.romed.com.br

E-mail: romed@romed.com.br

